


Unicorn Kolay Kullanım Kılavuzu


« LOT Tanımlama »

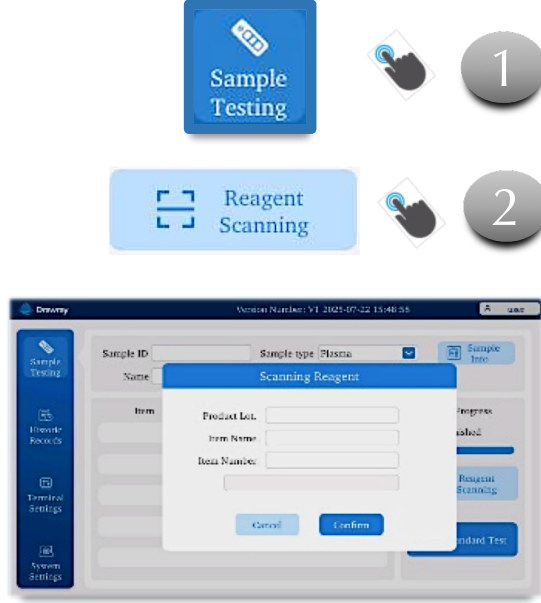

"Yukarıdaki menü açıldığında, Kit kutusunun içindeki QR Kod okutulmalıdır.
(Kontroller için folyo içindeki QR kod okutulmalıdır.)"



« Test Yükleme »

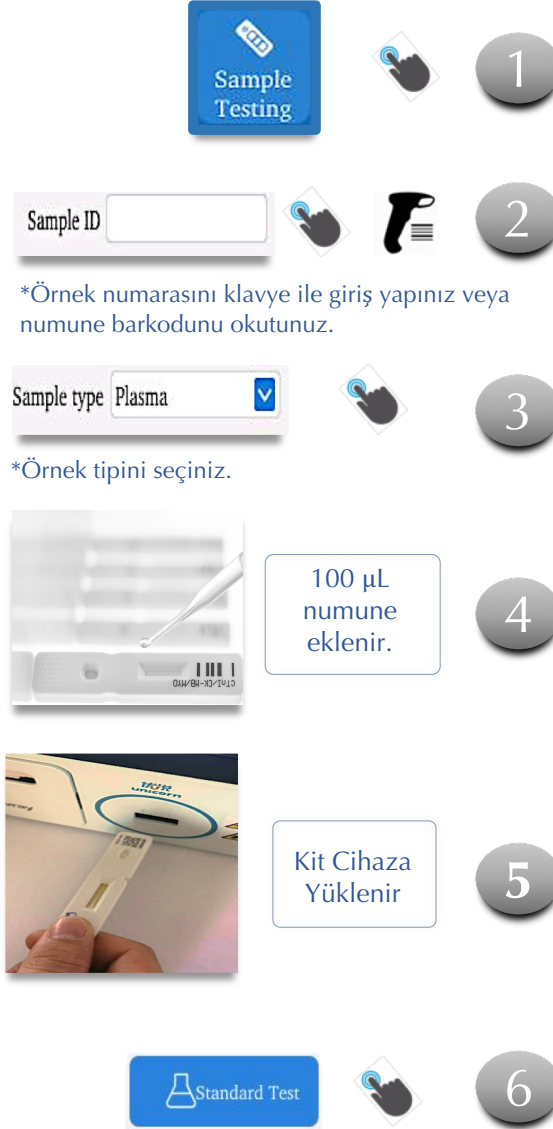

*Örnek numarasını klavye ile giriş yapınız veya numune barkodunu okutunuz.

*Örnek tipini seçiniz.

100 µL
numune
eklenir.

Kit Cihaza
Yüklenir

Örnek Çalışma

Geçmiş Sonuçlar

Ayarlar

Sample
Testing

Historic
Records

Terminal
Settings

System
Settings

« UYARI »

KONTROL KARTLARI HASTA
NUMUNESİ GİBİ ÇALIŞILIR,
**KONTROL ÇALIŞIRKEN HERHANGİ
BİR NUMUNE DAMLATILMAZ,**
KONTROL KİTLERİ DİREKT CİHAZA
YÜKLENİR..